



Instru Zym / Instru Zym wipes

- ▲ Reinigungskonzentrat bzw. gebrauchsfertige Reinigungstücher
- ▲ schaumarm
- ▲ materialschonend



DrDeppe



Instru Zym

ist ein enzymatischer Instrumentenreiniger zur material-schonenden Reinigung von chirurgischem und orthopädischem Instrumentarium, insbesondere für flexible und starre Endoskope sowie endoskopische Zusatzinstrumente.

Anwendung

Anwendbar bei Wassertemperaturen von 15-35°C. Schaumarm, ideal für das Zirkulationsverfahren und zur Ultraschallaufbereitung. Hochaktive Enzyme spalten und suspendieren organische Verschmutzungen wie Eiweiß, Blut, Sekrete, Detritus, Gewebereste und Fette.

Zusammensetzung

Protease, Amylase, Lipase, Cellulase, nichtionische Tenside; Konservierungsstoffe, Duftstoffe, gereinigtes Wasser

Chemisch-physikalische Daten

Farbe: schwach gelblich
pH-wert: 5,8-7 · Dichte: 1,03

Lagerung und Haltbarkeit

Behältnisse gut verschlossen halten.
Haltbarkeit nach Anbruch 12 Monate.

Gebindegrößen

Artikelnummer: **Gebindegröße:**

600001	2 x 5 Liter
600002	10 x 1 Liter
600444	6 x 2 Liter

Einwirkzeiten

je nach Grad der Verschmutzung	0,5-5% bei 3-5 Min.
--------------------------------	---------------------

Instru Zym wipes

sind gebrauchsfertige Reinigungstücher für die zeitsparende Vorreinigung von Endoskopen und medizinischem Zubehör, sowie für chirurgische und orthopädische Instrumente.

Anwendung

Das zu reinigende Instrument nach dem Einsatz schnellstmöglich mit dem Instru Zym wipes sorgfältig abwischen. Bei Bedarf mit einem neuen Tuch solange wiederholen bis die Oberfläche optisch sauber ist. Dabei auf eine vollständige Benetzung achten. Vorzugsweise sollte die Vorreinigung mit den Instru Zym wipes vom sauberen Ende des Instrumentes zum verschmutzten Ende hin durchgeführt werden.

Zusammensetzung der Tränklösung

Protease, Amylase, Lipase, nichtionische Tenside; Hilfsstoffe, Duftstoffe, gereinigtes Wasser

Haltbarkeit nach Anbruch:

28 Tage. Kühl und trocken lagern. Nach Gebrauch Verpackung gut verschließen, um das Austrocknen der Tücher zu verhindern. Nur feuchte Tücher für die Reinigung verwenden.

Gebindegrößen

Artikelnummer: **Gebindegröße:**

600897	6 x 80 Biowipes Flowpack
--------	--------------------------

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere aktuellen Gutachten zur Verfügung!



Stand: 06.11.2019

Laboratorium Dr. Deppe GmbH
Hooghe Weg 35 · D-47906 Kempen
T 02152.5565-0 · W www.drdeppe.de